



BK GRUP

BK GRUP İLAÇ SAĞLIK DANIŞMANLIK

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEK KULLANIMLIK TURNİKE



Güvenli. Kolay.

BK GRUP İLAÇ SAĞLIK DANIŞMANLIK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



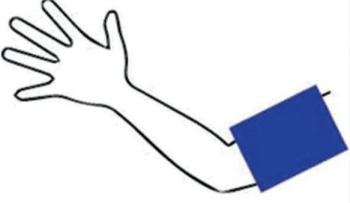
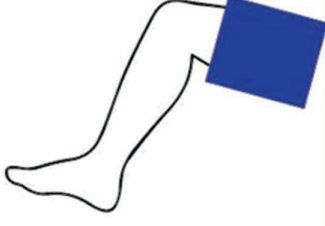
GÜVENLİ

KOLAY

Ürün Özellikleri:

- Ekstremitedeki kanı esmarch bandajından çok daha etkin boşaltır.
- Kullanıma hazır, tek kullanımlık ve sterildir. Bu sayede hem çok kolay uygulanır hem de cerrahi enfeksiyonları önler.
- Dar profili sayesinde daha geniş kansız cerrahi alan sağlar.
- Bir cihaza ihtiyaç duymaz, ekonomiktir.
- Güvenli sınırlar içinde ve yumuşak dokulara dar alanda basınç uygular. Sinirleri korur.

Kullanım Alanı Avantajları:

Pnömatik Kaf	BK GRUP İLAÇ SAĞLIK DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	
		Üst ekstremitede en az 12 cm daha fazla kansız cerrahi alan sağlar. Dirsek çevresi operasyonlarında rahatlıkla kullanılabilir.
		Alt ekstremitede en az 15 cm daha fazla kansız cerrahi alan sağlar. Dizi çevresi operasyonlarında rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama:

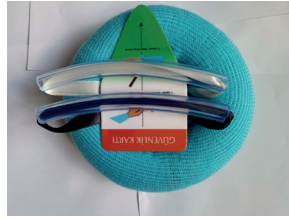


1. Turnike steril örtünmeden sonra uygulanır.
2. Ekstremitte ucundan yerleştirilir.
3. Uçtaki iki tutma ipinden her bir el ile tutulur.
4. İpler turnikeye dik olarak çekilir.
5. Turnike istenen seviyeye gelene kadar ilerletilir.
6. Cerrahi alandaki çorap kesilerek açılır.
7. Turnike koruyucusu üzerinden kesilip çıkarılır.

Uyarılar:

1. Uygun boy seçilmelidir.
2. Uygulama süresi 120 dakikayı geçmemelidir.
3. Ekstremitede dolaşım sorunu, ödem ve tromboz olan hastalarda kullanılmamalıdır.
4. Ciddi cilt lezyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
5. Aktif enfeksiyon ve kötü huylu tümör olan ekstremitelerde kullanılmamalıdır.

Ref. No	Versiyon/Model	Temel UDI-DI	Adet
ORT-0001	Turnike Kit Sistemi Alt Eksteremite Büyük	8684617947006	1
ORT-0002	Turnike Kit Sistemi Alt Eksteremite Orta	8684617947013	1
ORT-0003	Turnike Kit Sistemi Alt Eksteremite Küçük	8684617947020	1
ORT-0004	Turnike Kit Sistemi Üst Eksteremite Büyük	8684617947037	1
ORT-0005	Turnike Kit Sistemi Üst Eksteremite Orta	8684617947044	1
ORT-0006	Turnike Kit Sistemi Üst Eksteremite Küçük	8684617947051	1



BK Grup İlaç Sağlık Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Adres: Kazım Kar Bekir Paşa Mah. Kongre Cad. Hasırhan İş Merkezi No :6/131 Yakutiye Erzurum

+90 555 189 15 14

bkgrupturkey@gmail.com